



## NÁVOD K POUŽITÍ




Přečtěte si prosím tento návod k použití důkladně!!!  
Zabráníte tím škodám na přístroji a chráníte i sami sebe.

### Obsah

|                                                   |   |
|---------------------------------------------------|---|
| Popis přístroje a jeho funkcí.....                | 3 |
| Popis přístroje u funkcí .....                    | 3 |
| Než přístroj poprvé zapnete a chcete použít ..... | 4 |
| Dodávka .....                                     | 4 |
| Symboly a vysvětlivky .....                       | 4 |
| Symboly a vysvětlivky .....                       | 4 |

|                                                                                        |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Displej a vysvětlivky .....                                                            | 4  |
| Balení.....                                                                            | 5  |
| Použití přístroje .....                                                                | 5  |
| <i>Bezpečnostní pokyny</i> .....                                                       | 5  |
| Transport/uskladnění/provozní podmínky.....                                            | 6  |
| Uvedení do provozu .....                                                               | 6  |
| Instalace sáčku a ručního dílu. ....                                                   | 6  |
| El. připojení a zapnutí přístroje.....                                                 | 6  |
| Všeobecné funkce .....                                                                 | 7  |
| Nastavení otáček .....                                                                 | 7  |
| Otáčky aktivovat / deaktivovat / (pauza / Stand-By Funkce) .....                       | 8  |
| Paměť otáček (Memory-funkce).....                                                      | 8  |
| Směr otáček vlevo/vpravo .....                                                         | 8  |
| Výměna a nasazení frézek.....                                                          | 9  |
| <i>používejte frézy se stopkou s Ø 2,35 mm a min. 35 mm délky.!!!</i> .....            | 9  |
| Pojistka přetížení mikromotoru .....                                                   | 9  |
| Nastavení odsávání.....                                                                | 10 |
| Nastavení síly odsávání .....                                                          | 10 |
| Výměna sáčku .....                                                                     | 10 |
| <i>Včasná a poctivá výměna sáčků prodlužuje životnost Vaší odsávací turbíny.</i> ..... | 11 |
| Kontrolní systém pro výměnu sáčku .....                                                | 11 |
| Kalibrace odsávání.....                                                                | 11 |
| Krok č. 1: Dejte do odsávání nový sáček. ....                                          | 11 |
| Krok č. 2: Zapněte řídicí jednotku. ....                                               | 12 |
| krok č. 3: Uložení výpočtů a vrácení do hlavního menu.....                             | 13 |
| Teplotní pojistka odsávací turbíny .....                                               | 13 |
| <i>Možné příčiny přehřátí turbíny</i> .....                                            | 13 |
| Zásuvka pro pedál k nožnímu ovládání.....                                              | 13 |
| Čistění a dezinfekce .....                                                             | 13 |
| Čistění a dezinfekce .....                                                             | 13 |
| Manuelní čistění .....                                                                 | 14 |
| Vnitřní manuální dezinfekce se neprovádí.....                                          | 14 |
| Přístrojová dezinfekce a čistění zvrchu a ze vnitř se neprovádí .....                  | 14 |
| Čistění a dezinfekce ručního dílu .....                                                | 14 |
| Čistění a dezinfekce povrchu přístroje.....                                            | 15 |
| Výměna pojistky .....                                                                  | 15 |
| Technische Daten .....                                                                 | 16 |
| Odevzdání do sběru.....                                                                | 16 |
| Přístroj .....                                                                         | 16 |
| Obal .....                                                                             | 16 |
| Herstellerinformationen .....                                                          | 16 |

## Popis přístroje u funkcí

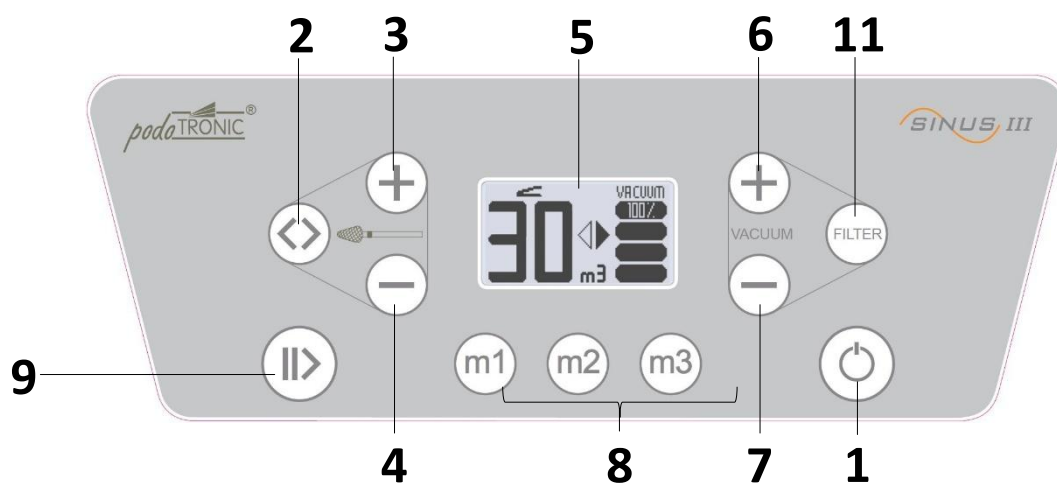


1. HLAVNÍ SPÍNAČ VYP/ZAPN.
2. OTÁČKY VLEVO/VPRAVO
3. ZMENŠIT OTÁČKY
4. DISPLEJ
5. ODSÁVÁNÍ ZVÝŠIT
6. ODSÁVÁNÍ SNÍŽIT
7. PAMĚŤ M1 M2 M3
8. START/STOP (STAND-BY)

10. Spojení na odsávací komoru

11. Kontrolka pro sáček  
Víko odsávací komory s el. kontakty
12. Hadice
13. Ruční díl s mikrovypínačem

Na zadní straně:

14. Zástrčka pro nožní pedál
15. Pojistka
16. Elektrický kabel připojení přístroje k el. síti

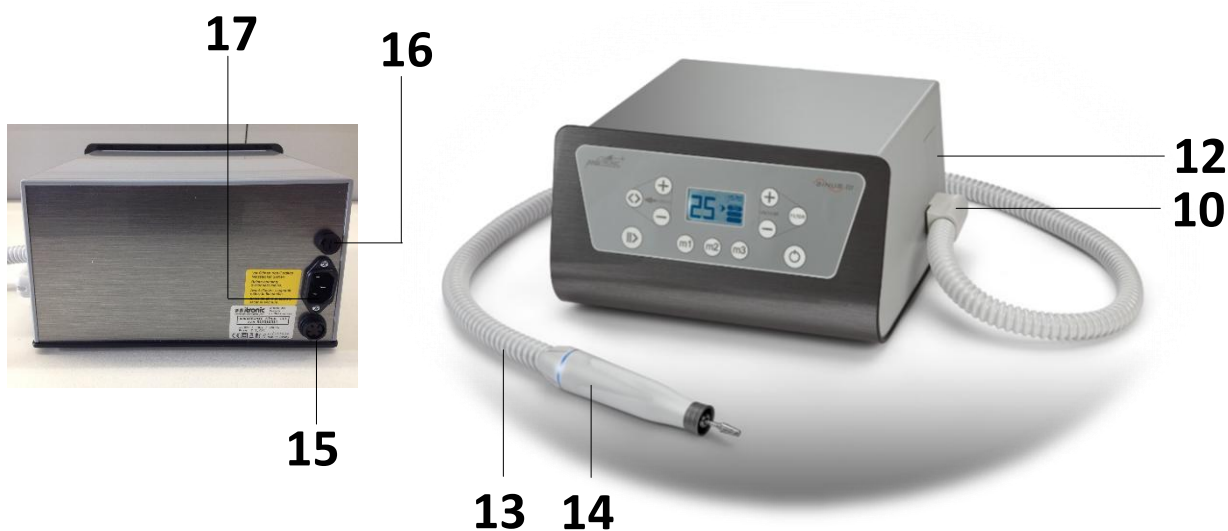

## Než přístroj poprvé zapnete a chcete použít

### Dodávka

Než přístroj uvedete do provozu zkontrolujte ho na možná poškození a jednotlivé díly dodávky

1x podoTRONIC SINUS III řídící jednotka  
1x Brushless ruční díl 30.000 ot/min. s hadicí a víkem k odsávací komoře  
1x El. kabel k připojení k el. síti  
1x Sáček do odsávání  
1x Návod k použití  
1x Čistič uchytáku fréz (šroubovák)  
1x Držák ručního dílu

### Symbole a vysvětlivky



CE-značka



Bezpečnostní třída:2



Typ B



Přístroj nemá do běžného odpadu



Dodržovat Návod k použití a jeho uložení.



Datum výroby

### Symbole a vysvětlivky




Nebezpečí pro člověka a přístroj. Nutně dodržovat!



Značka pro účinné pokyny

### Displej a vysvětlivky

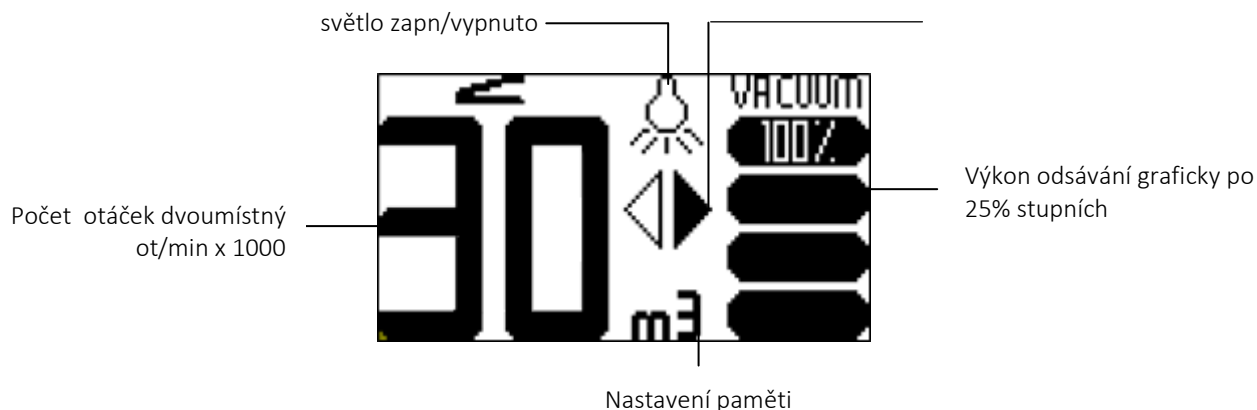

### Hinweise

- Pedál je připojený
- Ruční díl blokuje nebo je přetížený.  
Ruční díl i odsávací turbína se vypne. Přístroj se musí hlavním spínačem vypnout a zase zapnout ①
- Překročení teploty ssací turbíny ořes 63 °C. Sací turbína a mikromotour se vypnou.  
Po ochlazení turbíny o ca. 5 °C zmizí znak z displeje a přístroj se dá znovu použít.
- Výměna sáčku je nutná.
- Na přístroji není připojený ruční díl, nebo je ruční díl defektní, tak se objeví na displeji tato značka.  
Je třeba vše zkontrolovat.

## Balení

Balení pro přístroj slouží k přepravě a chrání před škodami z dopravy. Uchovejte si kompletní balení včetně vnitřních komponentů. Pro dopravu k opravě či servisu použijte naše balení. Chrání přístroj před škodami.

## Použití přístroje

PodoTRONIC SINUS III byl zkonstruován a vyroben dle následujících norem, aby zajišťoval kvalitu a bezpečnost dle norem:

EMV Richtlinie 2014/30/EU: EMV Fachgrundnorm EN 61000-6-1:2007 Störfestigkeit für Wohnbereich, Geschäfts- und Gewerbebereiche sowie Kleinbetriebe, EN 61000-6-3:2007 +A1:2011 Störaussendung für Wohnbereich, Geschäfts- und Gewerbebereiche sowie Kleinbetriebe.

NSP Richtlinie 2014/35/EU (alt2006/95/EG): Fachgrundnorm EN 60335-1(VDE 0700-1),10/2012

PodoTRONIC SINUS III používá rotační instrumenty jako jsou frézky, vrtáčky a podobné k opracování nohou, rukou, kůže a nehtů. Přístroj je používán v pedikúře, manikúře a nehtového designu. Přístroj smí používat jen zaškolený personál.

Při nedodržování návodu k použití odpadá záruka a nebudou přejímány veškeré škody..



### Bezpečnostní pokyny

Zkontrolujte obsah dodávky a zkontrolujte případná viditelná poškození.

Přečtěte si důkladně návod k použití a uložte ho ve Vaší blízkosti.

Prach z kůže a nehtů může vést ke zdravotním potížím. Noste ochrannou masku na ústa a nos.

*Nepoužívejte přístroj bez sáčků v odsávací komoře, nepoužívejte přístroj s poškozeným přívodním el. kabelem. Nepoužívejte přístroj při viditelném poškození přístroje.*

*Dbejte na připojení k el. síti 230 V.*

*Postavte přístroj na rovnou plochu a zabraňte zakrytí větracích otvorů na přístroji. Musí být zajištěna cirkulace vzduchu okolo přístroje. Nestavte přístroj těsně k ústřednímu topení a nebo k napařovači.*

*Přístroj zapínejte až po dosažení okolní teploty po delším čase ve studenu. Pracovní teplota je +10°C do 40°C.*

*Vypínejte přístroj hlavním spínačem  ① vždy, když se přístroj nachází v klidu a nebo v Stand-By – stavu.*

*Při případných opravách se obraťte na svého prodejce.*

*Vnikne-li do přístroje tekutina, přístroj okamžitě vypněte a zašlete Vašemu dodavateli.*

*Nyvysávejte žádné tekutiny!!!!*

*Při používání frézek kovových ne nerezových z jiné ocele, použijte dezinfekci s složkou proti reznutí. Používejte výhradně frézy s Ø 2,35 mm síly stopky a nejméně s 35mm délkou stopky! Nepoužívejte nikdy frézy mokré, znečištěné, ohnuté, poškozené, rezivé, nvybalancované. Řiďte se údaji o otáčkách fréz od výrobce.*

*Čistěte přístroj dle návodu k použití. Zabraňte vniknutí kapaliny do přístroje.*

## Transport/uskladnění/provozní podmínky

Transport provádějte v originálním balení od výrobce.

Transportní a skladová teplota: + 5°C - +50°C

Provozní teplota: +10°C - +40°C

Relativní vlhkost: max. 90% nekondenzující

Odstraňte VŽDY sáček z odsávání při transportu nebo uložení do skladu

## Uvedení do provozu

1. Ruční díl s hadicí je pevně připevněn k víku odsávací komory a na spodní části jsou kontakty el. propojení ručního dílu a řídicí jednotky. Nasaďte sáček a zasuňte víko do komory. El. kontakty se lehce spojí.



*Nepracujte NIKDY bez sáčku v odsávání..*



*Víko odsávací komory musí být vždy upevněno*

## Instalace sáčku a ručního dílu.

Hadice je pevně spojena s víkem  pomocí upevněné trubice .

Víko  obsahuje i el. kontakty pro pohon mikromotoru. Vložte víko  se sáčkem do odsávací komory.


Dejte pozor při vložení víka na správnou polohu el. kontaktů. Kontakty se nechají bez síly spojit. Ruční díl zasuňte do držáku na straně přístroje.

Zachovejte si vždy volný přístup k el. zásuvce a připojení k přístroji.

## El. připojení a zapnutí přístroje

Zastrčte el. kabel  na zadní straně přístroje. Zapněte přístroj po připojení k el. síti stlačením hlavního spínače  ① ein.

Po několika vteřinách se ukáže celková doba používání přístroje. ⑤:

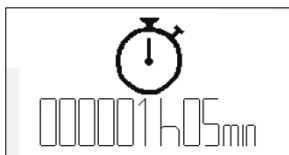

Potom přeskočí displej ⑤ ke standardnímu displeji.



Po vypnutí přístroje a jeho znovu zapnutí se přístroj nastaví na poslední nastavení před vypnutím. Nyní si můžete nastavení libovolně změnit. Nasadte na doraz frézku do uchytáku.



*Stopka frézky musí být vždy na doraz zasunutá.*



*Stopka frézky musí být čistá a rovná, ne ohnutá, jinak poškodíte uchyták frézky.*

## Všeobecné funkce

*Nastavení otáček*

*Otáčky aktivieren / deaktivieren / pauza - Stand-by funkce*

*Uložení otáček do paměti (Memory –Funkce)*

*Otáčky vlevo / vpravo*

*Nasazení / výměna frézky*

*Pojistka při přetížení mikromotoru*



*Každé nové nastavení se potvrzuje pípnutím přístroje.*

## Nastavení otáček

Vyndejte ruční díl z držáku na straně přístroje a držte ho pevně v ruce.

Zvolte stlačením Tlačítka + ③ žádanou rychlost otáček.



*Nastavené otáčky nesmějí být vyšší než udává výrobce frézky..*

Regulace je dvoustupňová v ot/min. x 1000) na displeji a dá se v následujících krocích nastavit:

|                   |                                 |   |                  |
|-------------------|---------------------------------|---|------------------|
| Ze základních ot. | 4.000 ot/min do 10.000 ot/min   | v | 500stech krocích |
| od                | 10.000 ot/min bis 30.000 ot/min |   | 1.000 krocích    |

*Například:*

Zmačkněte tlačítko + ③ **než displej ukáže 80** když si přejete 8.000 ot/min.

Zmačkněte tlačítko + ③ až se na displeji ukáže **15**, když si přejete 15.000 ot/min.

Při podržení tlačítka se rychlost nastavení zvýší

Při stlačení tlačítka - ④ můžete rychlost otáček zase snížit.

## Otáčky aktivovat / deaktivovat / (pauza / Stand-By Funkce)

Na řídicí jednotce

Tlačítko **II>** ⑨ poskytuje „pauzu / Stand-by - funkce“.

Nastavení před pauzou se uchová při novém zapnutí přístroje a poslední nastavení se ukáže. Symbol šipky  se střídá s blikajícím symbolem .

Jestliže opětně zmačknete symbol **II>** ⑨ poběží přístroj s nastavenými parametry. Aktivní provoz ukazují tmavé šipky **▶nebo ◀**

Na ručním dílu:

Tato funkce je zajištěna i použitím mikropínače na ručním dílu ⑭.

## Paměť otáček (Memory-funkce)

Uložení otáček do paměti se vykoná při nastavených otáčkách zmačknutím libovolného paměťového tlačítka ⑧ po dobu nejméně 3 vteřin a nastavení se ohlásí pípnutím přístroje.

Např. na **m1** nízké otáčky pro velké frézy, na **m2** střední rychlost pro středně velké frézy a na **m3 vyšší otáčky pro frézy malé**.

Zároveň se uloží i nastavení odsávání (25%, 50%, 75% oder 100%)

Od výrobce je nastaveno:

|           |   |           |                                   |
|-----------|---|-----------|-----------------------------------|
| <b>m1</b> | = | <b>80</b> | ( 8.000 U/min.; Saugleistung 25%) |
| <b>m2</b> | = | <b>15</b> | (15.000 U/min.; Saugleistung 50%) |
| <b>m3</b> | = | <b>22</b> | (22.000 U/min.; Saugleistung 75%) |

Toto základní nastavení si můžete kdykoliv změnit.



*Prach z kůže a nehtů může poškodit Vaše zdraví, při práci používejte roušku na dýchací cesty. Die Belastung durch Nagel- und Hautstaub kann gesundheitliche Risiken verursachen. Das Tragen eines Augen-/Mundschutzes und Handschuhe empfiehlt sich aus Hygiene- und Sicherheitsgründen.*



*Die eingestellte Drehzahl darf die zulässige Maximaldrehzahl gemäß den Angaben des Instrumenten-Herstellers NIEMALS übersteigen.*

## Směr otáček vlevo/vpravo

Nastavený směr otáček je vpravo a na displeji znázorněno černou šipkou .

Stlačením tlačítka **<>** ② se změni otáčky doleva.



*Každá změna tastaturou je potvrzena pípnutím.*



*Změna směru otáček se dá i za chodu přístroje, ale otáčky se musí snížit pod 10.000 ot/min*

## Výměna a nasazení frézek



*Při výměně frézek musí být přístroj vypnut do stavu "pauza" Stand-by*

Uchyták fréz je automatický

Vytáhněte používanou frézu ven a zastrčte novou až na doraz.

***používejte frézky se stopkou s  $\varnothing 2,35$  mm a min. 35 mm délky.!!!***

Nepoužívejte frézky mokré, znečištěné, křivé, rezavé, nvybalancované!!!

Doporučuje se výrobcem používat frézky do 6 mm v průměru, při větších průměrech frézek dbejte na pokyny výrobců fréz a dodržujte předepsané max. otáčky.

Pozor, používejte při velkých frézách s otáčkami pod 10.000 ot/min.

Při vyšších otáčkách vibruje ruční díl a může dojít k poškození ložisek, upínáku a dalších malých částí ručního dílu. **Čepičkové brusky mají od výrobce předepsáno: do 9 mm průměru max. 8.000 ot./min a nad 9 mm pouze 6.000 ot./min!!!!!!**



*Dbejte na udávané otáčky od výrobců frézek*




*Při vyšších otáčkách můžete poškodit ložiska, uchyták a i jiné části ručního dílu.*

Dbejte na doporučení otáček od výrobce fréz.

## Pojistka přetížení mikromotoru

Při eventuelní blokaci nebo přetížení mikromotoru, se mikromotor i sací turbína zastaví. Na displeji se objeví následující symbol:

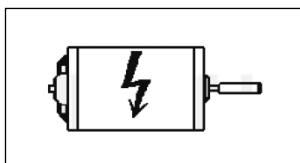

Po několika vtrínách symbol zmizí a přístroj je ve stavu "pauza" Stand-by. Otáčky jsou deaktivované.

V případě, že není ruční díl připojen nebo je defektní, ukáže se na displeji následující symbol:



Zkontrolujte korektní připojení víka na odsávací komoře ⑫. Nemáte-li úspěch, pošlete přístroj kompletně k prodejci na opravu.

## Nastavení odsávání

*Nastavení síly odsávání*

*Výměna sáčku*

*Kontrolní systém pro výměnu sáčku*

*Kalibrace odsávání a kontroly sáčku*

*Tepelná pojistka v odsávací turbíně*



*Prach z kůže a nehtů může ovlivnit Vaše zdraví. Pracujte s ochranou úst a nosu.*



*Odsávání nelze vypnout, vždy běží na minimum 25%.*

## Nastavení síly odsávání

Odsávání se dá nastavit ve 4 stupních (25% - 50% - 75% - 100%). Stlačením tlačítka **+** ⑥ se síla odsávání zvýší, nebo sníží - ⑦.

Na displeji je nastavené odsávání graficky znázorněno v černém políčku.



*Pro většinu úkonů je dostatečné nastavení na 50% .*

## Výměna sáčku

Vendejte víko z odsávací komory na straně přístroje ⑫ lehkým tahem ⑩ ven.

Sundejte opatrně stáhnutím opotřeбенý sáček a nasadte nový.



*Používejte jen originální sáčky od výrobce.*

*Sáček se nesmí vysypat a znovu použít.*



*Sáčky jsou jednorázové a nesmí se znovu použít. Jednak se ztěžuje odsávání a případné prasknutí sáčku zničí odsávací turbínu.*

*Ztratíte nárok na záruku. Vemte na vědomí, že výrobce si na základě přístrojového softwaeru lehce zjistí Vaše zacházení s přístrojem.*



*Přesvědčte se denně o stavu naplnění sáčku, popř. ho vyměňte.*



## **Včasná a poctivá výměna sáčků prodlužuje životnost Vaší odsávací turbíny.**

Při očividném snížení výkonu odsávání, ale nejspíše, když je sáček ze 2/3 plný, je nutná výměna. Jen tak Vám bude přístroj dlouho sloužit a zaručovat kvalitní odsávání. Přeplněný sáček vede k zahřívání odsávací turbíny.




*Pozor na protrhnutí sáčku. Při dalším používání zničíte odsávací turbínu.*

## Kontrolní systém pro výměnu sáčku

PodoTRONIC SINUS III je vybaven kontrolním systémem pro výměnu sáčku.

Aktuální stav naplnění sáčku se může kdykoliv zjistit zmačknutím tlačítka „**FILTER**“ <sup>(11)</sup> a krátce se ukáže na displeji:

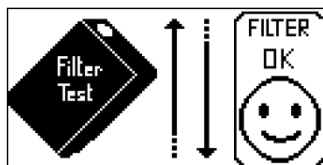

Jeli sáček už plný, ukáže se na displeji symbol jiný a je třeba sáček vyměnit:



Tento symbol zůstane na displeji než vyměníte sáček.



Vypnete přístroj tlačítkem  <sup>(1)</sup> a zapnete znovu, symbol zmizí, ale objeví se ca za 1 minutu znovu.



*Práce s přeplněným sáčkem je sice možná, ale pracujete na vlastní nebezpečí a zaniká záruka. Pozor, výrobce to ze softwaeru zjistí. U těchto moderních nových přístrojů je vše zaznamenáno.*



## Kalibrace odsávání

Odsávání se musí znovu kalibrovat, jestliže výška Vašeho pracoviště je o 350 m rozdílná od nastavení výrobce na 350 m nad mořem, nebo byla zabudována nová elektronická platinka.

Krok č. 1: Dejte do odsávání nový sáček.




- Tento nový sáček použijete i při další kalibraci, uložte si ho.
- U nové odsávací turbíny je třeba jednorodinová začáteční fáze se 75% výkonu odsávání na stabilizaci el. sítě. Hadice i ruční díl musí být čisté.
- Musí být zaručena cirkulace vzduchu okolo přístroje
  - Konec ručního dílu musí být volný
  - Zkontrolujte nasazení víka na odsávací komoru.




Krok č. 2: Zapněte řídicí jednotku.

- Nastavte otáčky na minimum 4.000 ot/min (4.0)
- Nastavte odsávání na (25%)
- Aktivujte vlevotočivý směr otáček tlačítkem < > ②  
Vypněte ruční díl na "pauza" Stand-by

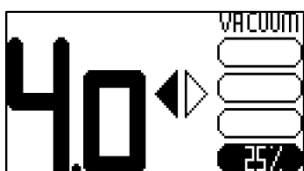

- Tlačítka odsávání Plus-/Minus zároveň stlačit a držet než naskočí displej do modusu Filter ca 3-4 vteřiny

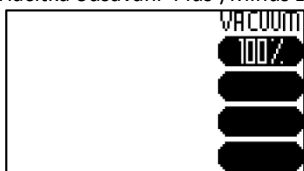

Přístroj automaticky proběhne všechny fáze odsávání, ca. 45 vteřin pro fázi a změřené údaje se objeví na displeji. Nevypínejte přístroj během měření!!!



Spočítaný referenční údaj vypočítá softwaere a ukáže ji na displeji. Nevypínejte přístroj, nezrušte práci softwaeru



V tomto modusu je obsluha přes tastaturu blokována. Po ukončení měření se přístroj sám nastaví do "pauza" Stand-by

Všechny hodnoty měření a vypočítané hodnoty se objeví na displeji

Změřená hodnota\*:

Vypočítaná hodnota\*:

|                 |        |                    |  |
|-----------------|--------|--------------------|--|
| 100% sáček nový | 003387 | 100% sáček plný    |  |
| 75% sáček nový  | 002947 | 75% sáček plný     |  |
| 50% sáček nový  | 002874 | Bei 50% sáček plný |  |
| 25% sáček nový  | 002501 | Bei 25% sáček plný |  |
|                 | 002529 |                    |  |
|                 | 002226 |                    |  |
|                 | 001952 |                    |  |
|                 | 001718 |                    |  |

\*Tabulka je jen příklad

### krok č. 3: Uložení výpočtů a vrácení do hlavního menu

Po skončení měření se přístroj sám přepne do hlavního menu.

Vypněte přístroj a zapněte ho znovu asi po 10 vteřinách

Stačte znovu tlačítko Filter až se znovu objeví Filter modus a zkontrolujte znovu uložená data.

## Teplotní pojistka odsávací turbíny

Po překročení teploty 63 °C se odsávání i mikromotor vypne a na displeji se objeví hlášení "OVERHEAT" :



Po snížení teploty asi o 5 °C zmizí symbol z displeje a přístroj je připraven k práci.



### ***Možné příčiny přehřátí turbíny***

- *Ucpaná hadice, ucpaný ruční díl nebo plný sáček*
- *Přikryté otvory na straně přístroje*

Jestliže je vše v pořádku, je jiný defekt na přístroji a musíte ho zaslat prodejci.

## Zásuvka pro pedál k nožnímu ovládání



*Lze dokoupit nožní ovládání pedálem a připojení k zásuvce ⑩.*

Při připojení pedálu se objeví na displeji symbol

JSOU DVA DRUHY PEDÁLŮ:

JEDEN PEDÁL JE NA ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ PRO VÝMĚNU FRÉZEK. DRUHÝM PEDÁLEM JE MOŽNO OVLIVŇOVAT POČET OTÁČEK.



*Nastavené otáčky nesmějí přesahovat doporučené otáčky od výrobce fréz.*

## Čistění a dezinfekce

*Čistění uchytáku fréz*

*Výměna pojistky*



*Doporučujeme přístroj poslat 1x za rok na prohlídku k prodejci.*

## Čistění a dezinfekce



*Před údržbou odpojte přístroj od el. sítě!*



*Nepoužívejte dezinfekční spreje! Mohla by vniknou do přístroje a uchytku kapalina a uškodit přístroj, popř způsobit el. zkrat.*



*Používejte jen doporučené čisticí prostředky ve spojení s vlhkou utěrkou k utření povrchu přístroje.*



## Manuelní čištění

### **DOPORUČUJEME VYZKOUŠENÉ DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDKY:**

- Mikrozid AF Liquid firmy Schülke & Mayr
  - FD 322 firmy Duer
- Používejte jemné utěrky z bavlny nebo mikrovlákn


Vnitřní manuální dezinfekce se neprovádí

Přístrojová dezinfekce a čištění zevně a ze vnitř se neprovádí

## Čištění a dezinfekce ručního dílu

Das Handstück sollte je nach Gebrauch mindestens einmal wöchentlich gereinigt werden.

1. Ruční díl opatrně oddělit od hadice.

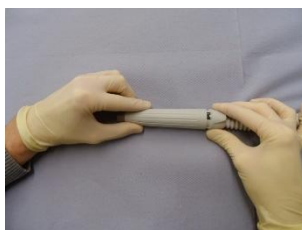



2. Vysuňte opatrně mikromotor s uchytkem fréz z obalu ručního dílu.



3. Vyčistěte jemným štětečkem a nebo poroudem vzduchu vnitřek ručního dílu, očistěte mikromotor a kontakty štětečkem a dezinfikujte dezinfekčními polštářky či utěrkou.



4. Sestavte opět ruční díl opačným postupem, dbejte na správné zasazení do plastového pouzdra, zkontrolujte pozici el. kontaktů pořed konečným spojením s hadicí.

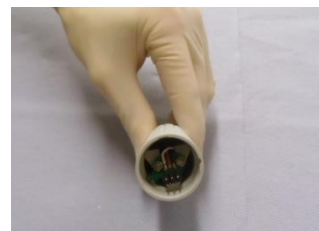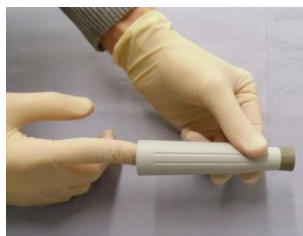

5. Proveďte koncovou kontrolu správného zasazení mikromotoru a polohu el. kontaktů a poté obě strany spojte.



*Dbejte na to, aby nevnikla žádná kapalina do ručního dílu, pozor nebezpečí el. zkratu a úrazu el. energií.*

### Čistění a dezinfekce povrchu přístroje

Otřete přístroj vlhkou utěrkou s obsahem dezinfkce a nebo dezinfekčními polštářky.


*Zabraňte vniknutí kapaliny do přístroje, hrozí zničení přístroje nebo úrazu el. energií.*

### **Vyčistění uchytáku fréz:**

Stane se při zasouvání fréz, že se i s frézou dostane do uchytáku jemný pach a po čase může dojít k potížím při zasouvání frézek. Je třeba uchyták čas od času vyčistit následujícím postupem:



K přístroji byl dodán speciální vrtáček sloužící k jednoduchém čišění

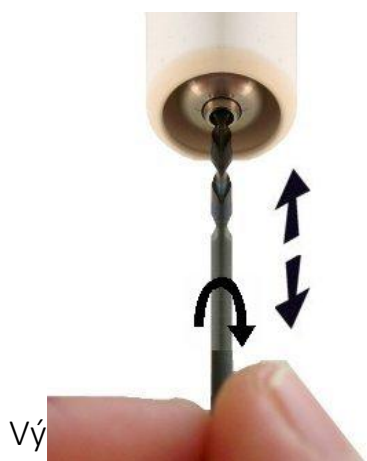

Zastrčte opatřě nvrtáček do uchytáku a otáčejte ve směru hodinových ručiček (do prava) a zase opatrně opatrně vysunujte. Toto opakujte několikrát. Důležité: **díl držte směrem dolů**

Vý



*Odpojte přístroj od el. sítě!!!*

Pojistka je na zadní straně ⑯. Otočte vhodným šroubovákem pojisku a byšroubujte jia vy měňte za novou T 1,25 A

### **Garance/záruka**

Záruka je 12 měsíců ode dne, kdy jste přístroj zakoupili. Záruka se nevztahuje na díly normálního opotřebení, způsobené provozem přístroje. Rotační díly jako ložiska, uchyták, uhlíky odsávacího motoru nepodléhají záruce a jsou z ní vyjmuty. Předpoklad pro zárukou opravu je dodávka přístroje na adresu dodavatele. Záruka odpadá při nesprávném používání přístroje, nedodržení návodu k použití nebo zásahem do přístroje. Záruka se vztahuje pouze na přístroj. Záruka neručí za jiné škody jako např., výpadek obratu a výdělku, povinné ručení a pod. Zjistí-li se, že závada byla mimo zárukou dobu a nebo nespadala do záruky, musí zákazník zaplatit prohlídku a opravu přístroje.

## Technische Daten

|                             |                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Anschluß:                   | 100 – 230V / 50 Hz – 60 Hz                              |
| Leistungsaufnahme:          | max. 200 Watt                                           |
| Mikromotor -Handstück:      | max. 50 Watt / 24 V / 30.000 U/min / Brushless DC Motor |
| Hlučnost                    | 46 DB při 75% odsávání                                  |
| Abmessung Steuergerät:      | (B x H x T) 240 x 135 x 235 mm                          |
| Abmessung Absaug-Handstück: | L = 118 mm, D= 17-27-31 mm                              |
| Gewicht:                    | ca. 2,8 kg (Set)                                        |
| Sicherung:                  | T 1,25 A                                                |

Schutzklasse: 2 

### Odevzdání do sběru

Před odevzdáním do příslušného sběru je nutno přístroj řádně vyčistit.

Je třeba dbát pokynů 2002/96/EG (WEEE) a specifickým nařízením v jednotlivých EU zemích.



*Odevzdání do sběru může být v jednotlivých EU zemích různé, informujte se*

*Přístroj*

Staré přístroje napatří do všeobecného odpadu.



*Podívejte se na pravidla odevzdání do sběru*

Sáčky patří do speciálního sběru.

Obal

Obal je papírový a dá recyklovat.



*Každá eu země má jiné předpisy, informujte se.*

## Herstellerinformationen

**Unitronic**  
Elektronische Steuergeräte GmbH

Unitronic Elektronische Steuergeräte GmbH  
Steubenstraße 3  
D 75249 Kieselbronn  
Tel: +49 7231 95 8 95 0  
Fax: +49 7231 95 8 95 95  
Mail: info@unitronic.net  
www.unitronic.net